

So beladen Sie Ihren Autoklav richtig



Sie haben eine
**Frage zu Ihren
Sterilisatoren?**

Unsere Service-
techniker sind
gerne für Sie da!
Tel. 044 755 51 56

Wie voll darf der Autoklav beladen werden und was ist dabei zu beachten? Das korrekte Beladen Ihres Sterilisators ist eigentlich ganz einfach. Trotzdem gibt es einige Dinge, die Sie beachten sollten. Mit unseren Tipps geht das Befüllen schon fast von selbst.

Dürfen alle Produkte im Autoklav sterilisiert werden?

Stellen Sie als Erstes sicher, dass nur Medizinprodukte in den Autoklav kommen, welche vom Hersteller für die maschinelle Aufbereitung im Autoklav vorgesehen sind. Beachten Sie dabei dessen Aufbereitungsangaben und informieren Sie sich bei Unsicherheiten direkt beim Hersteller.

Wie befülle ich den Autoklav korrekt?

Beim Beladen des Autoklavs muss darauf geachtet werden, dass dieser nicht zu voll beladen wird. Die Medizinprodukte dürfen also die Kammerwand und die Tür des Autoklaven nicht berühren. Zudem sollten verpackte und unverpackte Medizinprodukte nicht gemischt werden. Im oberen Bereich des Autoklavs kommen die Tablettts mit verpackten Medizininstrumenten. Im unteren Bereich werden die schweren und unverpackten Medizinprodukte verstaut.

Werden Tablettts oder Trays genutzt, ist darauf zu achten, dass diese perforiert sind. Die Löcher ermöglichen, dass das während dem Sterilisationsprozess entstandene Kondensat ablaufen kann. Bei der Anordnung der verpackten Medizinprodukte auf dem Tablett muss sichergestellt werden, dass die Produkte nicht übereinanderliegen und dass die Folienseite der Klarsichtverpackungen nach oben zeigt. Dies ermöglicht das problemlose Abfließen des Kondensats.

!! CHECKLISTE für das Beladen des Autoklavs

- ☐ Der Autoklav ist nicht zu voll beladen
- ☐ Keine Verwendung von Dentalklebeband zur Verschlussung der Verpackungen oder selbstklebenden Sterilverpackungen
- ☐ Die Medizinprodukte berühren weder die Tür noch die Kammerwand
- ☐ Die Tablettts sind perforiert
- ☐ Die Medizinprodukte liegen nicht übereinander
- ☐ Die Folienseite der Verpackungen zeigt nach oben
- ☐ Verpackte und unverpackte Medizinprodukte sind nicht gemischt
- ☐ Verpackte Medizinprodukte befinden sich im oberen Teil des Autoklavs
- ☐ Unverpackte Medizinprodukte befinden sich im unteren Teil des Autoklavs

Sie haben alle Punkte der Checkliste erfolgreich erledigt? Dann steht einem einwandfreien Sterilisationsdurchgang Ihrer Medizinprodukte nichts mehr im Weg. Sollten Sie noch Fragen betreffend Ihres Autoklavs haben, dann sind unsere Service-Techniker gerne für Sie da.

