

# Das Herz jeder Zahnarztpraxis – der Kompressor

Egal ob beim Kieferorthopäden oder beim Endo-Spezialist- der Kompressor versorgt die ganze Praxis zuverlässig mit Druckluft. Fällt dieser aus, können fast sämtliche Geräte nicht mehr genutzt werden. Um stets einen reibungslosen Praxisalltag ermöglichen zu können, ist die regelmässige Prüfung des Gerätes deshalb dringend anzuraten. Mit unsere Tipps und Tricks wird dies zum Kinderspiel.

**JETZT**  
Techniker-Check  
vereinbaren:  
**Tel. 044 755 51 56**



## Alles auf einen Blick

Überprüfen Sie sämtliche Anzeigen und Werte Ihres Kompressors anhand von den unten aufgeführten Bildern. Kontrollieren Sie die Werte bestmöglich **1 Mal pro Woche**.

Stimmen die Werte Ihres Kompressors mit oben gezeigten Werten überein, steht einem problemlosen Arbeitsalltag nichts im Wege. Haben Sie noch offene Fragen oder benötigen Sie professionelle Hilfe, dann erreichen Sie uns ganz einfach unter:

**Tel. 044 755 51 56 für den technischen Support**

Tel. 079 644 02 02 für Notfälle ausserhalb der Bürozeiten

Unsere Techniker sind jederzeit für Sie da!  
Ihr abc-dental-Team

### Druckaufbau

Druckaufbau sollte bei ca. 8–9 Bar stoppen.

### Feucht-/Trockenindikator

- 1–4 LEDs= normal
- 5 orange LEDs = Fehler



### Manometer nicht vergessen

Es sollte ein Druck von ca. 5–6 Bar angezeigt werden.

